

LIFE LINE**BATTERIA 7 ANNI****KIT Elettrodi****BORSA DA TRASPORTO****MANUALE D'USO****CARATTERISTICHE**

Elettrodi già a bordo
Manico ergonomico
Batteria durata 7 anni
Led indicatore stato
Luci avviso funzioni
Due tasti di funzione
Leggero e maneggevole
Resistente agli urti

**SEMPLICE DA USARE**

Lifeline AED è stato studiato per un funzionamento semplice. E' sempre pronto all'uso e permette all'operatore di concentrarsi sul paziente. Vi sono solo due pulsanti di comando e quattro diodi ad emissione luminosa (LED). Una voce guida con comandi vocali concisi e facilmente comprensibili, veicolano l'operatore durante l'uso dell'unità.

GLI AUTOTEST

Il Lifeline AED è famoso nel suo genere perchè è un prodotto concepito per non fallire mai e affinché questo non avvenga il Lifeline AED genera su se stesso degli autotest periodici che ne garantiscono la totale efficienza. Questo DAE è in grado di autotestare le proprie funzioni ogni giorno, settimana, mese ed esegue un test trimestrale in cui si auto genera una scarica.

**LIFELINE AED DCF-E 110****BATTERIA 7 ANNI
GARANZIA 8 ANNI**

COSA POSSIAMO OFFRIRTI IN PIU'?



CENTRO DI FORMAZIONE

Sunnex vanta un proprio centro di formazione interfacciato in tutte le Regioni Italiane con personale docente IRC certificato e accreditato presso tutte le centrali operative. Seguiamo il cliente dalle prime fasi dell'acquisto al fine di garantire al personale che utilizzerà il DAE le certificazioni di tipo BLSD-A e BLSD-B e relativi retraining biennali, nel rispetto delle norme territoriali di competenza ivi compreso la documentazione burocratica necessaria.

CENTRO DI MANUTENZIONE

Personale qualificato per un servizio di rapida assistenza manutenzione programmata periodica e certificata, seguendo le direttive tecniche del costruttore e nel rispetto delle vigenti norme in materia di apparati elettro medicali per una piena efficienza operativa del dispositivo per la defibrillazione DAE.



SCHEDA TECNICA DCF-E110

Categoria		Descrizione
Forma d'onda		Bifasica esponenziale tronca
Energia		Adulti: Nominale 150 J con carichi da 50 ohm Bambini: 50 J nominale con un carico da 50 ohm
Controllo caricamento		Automatico tramite sistema di analisi del paziente
Tempo di caricamento dall'avviso di scarica		Di norma < 6 secondi con pacco batteria nuova DBP-2800 e < 9 secondi con pacco batteria nuova DBP-1400. Il tempo di caricamento può aumentare quando le batterie sono quasi scariche e con temperature inferiori ai 10°C.
Indicazione caricamento completato		- Il pulsante SCARICA lampeggia - Comando vocale "Premere pulsante scarica"
Erogazione scarica		La scarica viene erogata da un unico pulsante SCARICA
DISATTIVAZIONE	Automatica	- Se il sistema di analisi del paziente reputa che il ritmo non sia più defibrillabile, oppure - Se l'operatore non ha premuto il pulsante SCARICA entro 30 secondi dal completamento del caricamento, oppure - Se gli elettrodi defibrillanti sono stati rimossi dal paziente o disconnessi dall'unità.
	Manuale	Se l'operatore preme il pulsante OFF/DISATTIVA in qualsiasi momento per disattivare o spegnere l'apparecchio.

ACCESSORI OPZIONALI

SD CARD



ELETTRODI PEDIATRICI



ARMADIO METALLICO



LE CREDENZIALI

Il Lifeline AED è l'unico mezzo salvavita ad aver passato a pieno i test della FDA Americana e del CE Europeo, che effettuano controlli e certificano prodotti medicali affinché abbiano i requisiti per poter esser messi in commercio. Il Lifeline vanta due certificazioni che lo inseriscono al primo posto tra i DAE in commercio. Quando si dice Lifeline AED si parla del mezzo salvavita più sicuro ed evoluto nel mercato della Defibrillazione mondiale.

