



GIMA

TEST STREP-A - streptococco - cassetta

Codice: 24520
Categoria: Test diagnostici uso professionale
Unità di vendita: conf. 20 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: IVD - Uso Professionale



NSIS: 2375421
CND: W0105090103
EAN13: 8023279245202

Descrizione: TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test

Gent.mi clienti,

Vi informiamo che fino alla fine di gennaio / metà febbraio riceverete i test strep-A 24520 e 24521 nella confezione originale del fabbricante - anziché con scatola brandizzata GIMA.

Le caratteristiche e le performance del prodotto rimangono invariate, resta certificato IVDR ed è completamente identico in composizione, accuratezza e metodologia di utilizzo.

Risultati accurati in pochi minuti.

Utilizzo facile, indicazioni chiare e precise.

La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento.

I reagenti rimangono stabili per tutta la durata di conservazione, anche dopo essere stati aperti.

Sono inclusi: 20 cassette (pacco singolo), 2 reagenti, 20 provette e tamponi sterili, soluzione di controllo positività/negatività.

Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, SE, RO, SK)

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

Caratteristiche tecniche: Sensibilità relativa: 95,1% (89,6-98,2%)
Accuratezza: 97,1% (95,3-98,4%)
Specificità relativa: 97,8% (95,8-99%)

PROCEDURA

- aggiungere 4 gocce di reagente A, quindi le gocce del reagente B
- ruotare 15 volte il tampone, attendere 1 minuto, quindi rimuovere il tampone comprimendo nel contempo la provetta per eliminare il liquido
- posizionare la punta del contagocce all'estremità superiore della provetta
- aggiungere 3 gocce di campione
- leggere i risultati dopo 5 minuti