




[A]

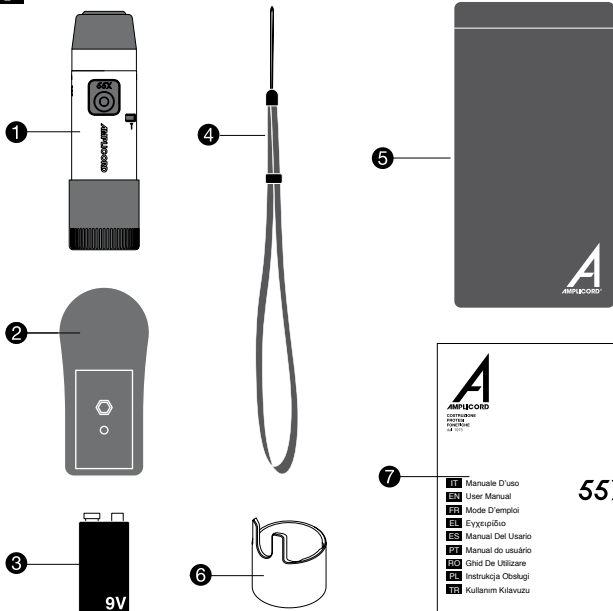


[B]

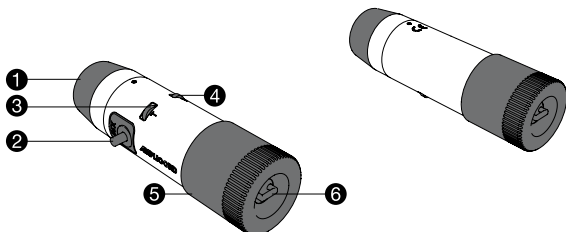


[C] 1

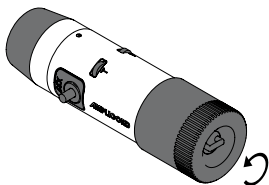


[C] 2

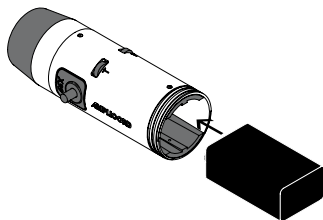


[C] 3

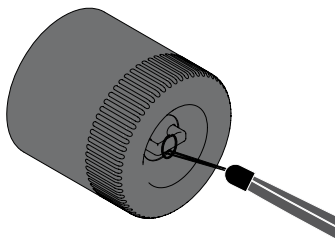


[C] 4

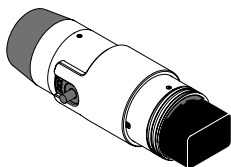


[C] 5

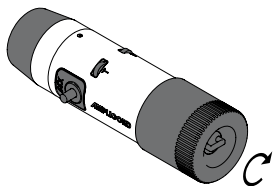


[D] 1

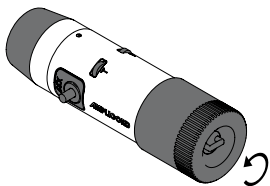


[D] 2

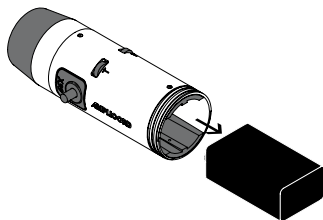


[D] 3






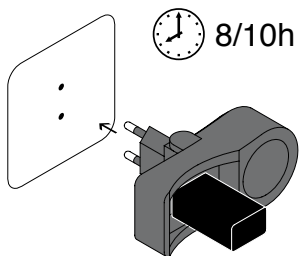


[D] 4

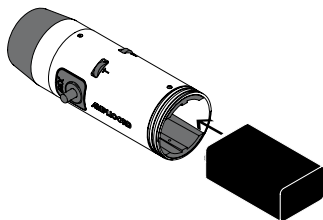

[D] 5

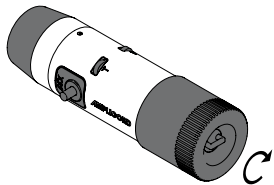

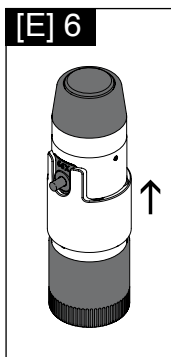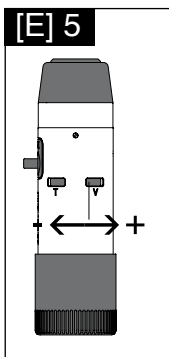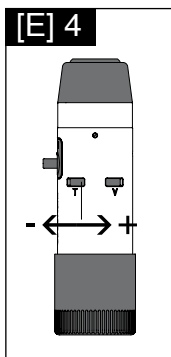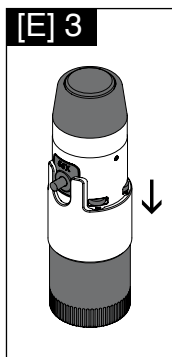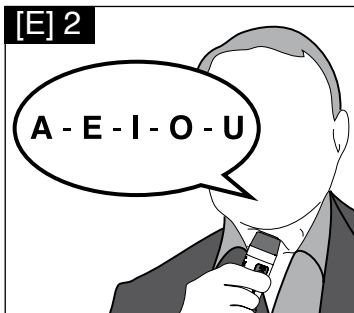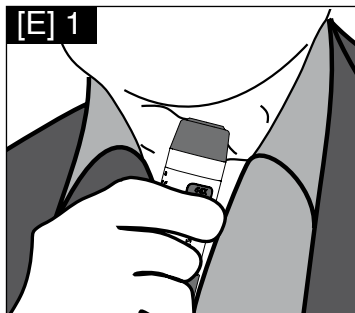

Contenuto della confezione [A]

- | | |
|---|---------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❹ Laccio |
| ❷ Alimentatore AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❺ Custodia |
| ❸ Batteria ricaricabile 8.4V 250mAh | ❻ Blocca regolatori |
| | ❼ Manuale utente |

Descrizione del prodotto [B]

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ❶ Testina | ❹ Regolatore del volume |
| ❷ Pulsante | ❺ Tappo batteria |
| ❸ Regolatore del tono | ❻ Attacco laccio |

Per iniziare [C]

1. Svitare il tappo batteria.
2. Inserire la batteria allineando i contatti.
3. Se lo si desidera, attaccare il laccio.
4. Se lo si desidera, applicare il blocca regolatori.
5. Riavvitare il tappo batteria.

Ricaricare la batteria [D]

1. Svitare il tappo batteria.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la batteria nel carica batteria ed attaccarlo alla presa della corrente. Per ricaricare completamente la batteria servono circa 8/10 ore.
4. Rimuovere la batteria carica ed inserirla nuovamente nel laringofono allineando i contatti.
5. Riavvitare il tappo batteria.

Istruzioni per l'uso [E]

1. Poggiare il dispositivo con una leggera e omogenea pressione sopra la parte più morbida della gola.
2. Premere il pulsante per attivare il funzionamento del laringofono e provare la voce del dispositivo vocalizzando le lettere **A - E - I - O - U**.
3. *In caso abbiate applicato il blocca regolatori, fatelo scorrere verso il basso fino a scoprire i regolatori stessi.*
4. Utilizzare il regolatore del tono **T** per raggiungere la tonalità desiderata.
5. Utilizzare il regolatore del volume **V** per raggiungere il livello desiderato.
6. *In caso abbiate applicato il blocca regolatori, fatelo scorrere verso l'alto fino a coprire i regolatori stessi.*

Manutenzione e norme di utilizzo

La manutenzione deve essere effettuata dal distributore.

Si consiglia una pulizia con cadenza settimanale usando un panno con un po' di alcool denaturato. Non usare nessun altro tipo di solventi.

Tenere lontano da fonti di calore e non immergere in acqua o altri liquidi.

Nel caso di problemi dovuti a malfunzionamento, difetti, eventi o situazioni inaspettate e per le modalità di manutenzione del dispositivo, si prega di contattare il fabbricante o il distributore locale.

Il dispositivo va utilizzato da una singola persona.

Condizioni ambientali di trasporto e immagazzinamento

Temperatura: +5° a +40°;

Umidità relativa: 15%-90% non condensata senza vapore acqueo;

Pressione parziale: >50hPa;

Pressione atmosferica: 700hPa-1060hPa;

La batteria ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti di parlato continuativo e ha un ciclo di vita di circa 1 anno e mezzo.

L'aspettativa di durata del dispositivo è stimata intorno ai 10 anni.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Rimedio
Il dispositivo non vibra.	La batteria potrebbe essere scarica o esaurita.	Ricaricare o sostituire la batteria.

Garanzia

Il dispositivo Amplicord 55X è garantito in ogni suo componente per due anni (24 mesi) dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto di materiale o di costruzione. La garanzia consiste nella sostituzione e/o riparazione gratuita dei componenti difettosi. La garanzia decade se l'apparecchio è stato manomesso, se il difetto deriva da uso improprio e salvo cadute. Sono esclusi dalla garanzia l'alimentatore e la batteria ricaricabile.