



GUIDA ALLA CURA E ALLA PULIZIA DEL RIVESTIMENTO SKAI

Per conservare l'aspetto originale e impedire l'accumulo di sporcizia e sostanze inquinanti, il vinile dovrebbe essere pulito periodicamente.

Qualsiasi macchia, liquido o incrostazione dovrebbe essere rimossa tempestivamente per evitare che si trasformi in un'imperfezione permanente.

Per eliminare le macchie sulla superficie del materiale, **fare uso di soluzioni saponate o di detergenti specifici per tessuti in vinile**. Rimuovere utilizzando solo un panno bianco umido.

Lacche, detergenti aggressivi, detersivi, soluzioni a base di xilene, acetone o metiletilchetone (MEK) causano danni immediati e contribuiscono al deterioramento del materiale. L'uso di tali sostanze avviene a rischio del proprietario.

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

1. Pulire l'intera superficie con una miscela 1:9 di sapone liquido (pH neutro) e acqua. Non utilizzare sapone o soluzioni detergenti che contengano alcool, chetoni, xilene, acetati o solventi (acquaragia).
2. Rimuovere completamente il detergente in eccesso con un panno bianco pulito e umido.
3. Asciugare la superficie.

ELIMINARE LE MACCHIE UTILIZZANDO UNO DEI SEGUENTI METODI

METODO 1 Caffè, succo di frutta, vino rosso, sugo, cioccolato, grasso, pastello e crema solare

Processo di cura e pulizia

Rimuovere il liquido in eccesso con un panno bianco umido o una spazzola morbida. Pulire con una miscela 1:9 di sapone liquido a pH neutro e acqua. Quindi sciacquare con acqua pulita e asciugare.

METODO 2 Trucco

Processo di cura e pulizia

Applicare sapone a pH neutro non diluito. Rimuovere con un panno bianco pulito o una spazzola morbida, sciacquare con acqua pulita e asciugare.

METODO 3 Sangue, urina, feci

Processo di cura e pulizia

Utilizzare una miscela 1:1 di alcool isopropilico e acqua. Sciacquare con acqua pulita e asciugare.

METODO 4 Qualsiasi altra macchia resistente

Processo di cura e pulizia

Impiegare una soluzione allo 0,5% di candeggina domestica e acqua (miscela 1 di candeggina e 9 di acqua). Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e tamponare per asciugare.

NB.

I metodi 2-3-4 non sono raccomandati per la pulizia quotidiana