

Articolo

9652



Categoria commerciale

REGGISENI MASTECTOMIA

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE	55%
COTONE	33%
ELASTAN	9%
POLIESTERE	3%
	100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR	
S	74-80	L	86-92	XXL	96-106
M	80-86	XL	92-96		

Coppa B e C

Lavaggio

				
Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Asciugare nell'asciugatrice con il programma delicato.	Non stirare.	Non lavare a secco.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale reggiseno.



Completamente apribile per un indossamento facilitato

Indicazioni

Reggiseno per post-intervento di mastectomia. Interventi al seno.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.