



GIMA

TEST STREP-A - streptococco - striscia

Codice: 24521
Categoria: Test diagnostici uso professionale
Unità di vendita: conf. 25 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: IVD - Uso Professionale



NSIS: 2375421
CND: W0105090103
EAN13: 8023279245219

Descrizione: TEST STREP-A - striscia - conf. da 25 test

Risultati accurati in pochi minuti.

Utilizzo facile, indicazioni chiare e precise.

La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento.

I reagenti rimangono stabili per tutta la durata di conservazione, anche dopo essere stati aperti.

Sono inclusi: 25 strisce (pacco singolo), 2 reagenti, 25 provette e tamponi sterili, soluzione di controllo positività/negatività.

Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, SE, RO, SK)

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

Caratteristiche tecniche:
Sensibilità relativa: 95,1% (89,6-98,2%)
Accuratezza: 97,1% (95,3-98,4%)
Specificità relativa: 97,8% (95,8-99%)

PROCEDURA

- aggiungere 4 gocce di reagente A, quindi le gocce del reagente B
- ruotare 15 volte il tampone, attendere 1 minuto, quindi rimuovere il tampone comprimendo nel contempo la provetta per eliminare il liquido
- immergere la striscia nel campione
- leggere i risultati dopo 5 minuti